

Zakład Mikrobiologii Klinicznej USDK

Materiały do badań mikrobiologicznych należy dostarczać w sterylnych pojemnikach/probówkach/zestawach transportowych!

Pracownia Bakteriologii Beztlenowców (tel. wew. 1371, 4946), osoba do kontaktu: mgr Barbara Wąsik									
Kod	Nazwa badania	Pobranie próbki	Oznaczenie w materiale	Czas/temp. dostarczenia próbki do laboratorium		Specjalne wymagania	Warunki przechowywania materiału gdy brak możliwości dostarczenia w wymaganym czasie	Metodyka	Czas oczekiwania na wynik
3224-B	Bakterie beztlenowe (posiew w systemie BACTEC)	Płyn z opłucnej/otrzewnej/płyn z jamy ciała		natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	Nd.	Posiew	7 dni
3202	Badanie w kierunku bakterii beztlenowych (nie dotyczy 3218, 3221, 3224)	Każdy rodzaj materiału		do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Max czas przechowywania do 24 godz.	do 24 godz. w temp. pokojowej	Posiew	7-21 dni, w zależności od kierunku badania
3212	Stolec w kierunku <i>Campylobacter</i> (antygen+hodowla)	Stolec w pojemniku i na wymazie transportowym		do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. lodówki	do 96 godz. w temp. 2-8°C	Immunochemiczna (immunochromatografia) + posiew	Antygen 24 godz. w dni robocze (pon-pt); hodowla do 7 dni
3227	Stolec w kierunku <i>Clostridioides difficile</i> (antygen + toksyny A/B)	Stolec biegunkowy (nieuformowany)		do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. lodówki	do 72 godz. w temp. 2-8°C	Immunochemiczna (immunochromatografia)	Antygen i toksyny – 24 godz. w dni robocze (pon-pt)
3236	Badania przesiewowe w kierunku kiły (VDRL/RPR)	Krew na skrzep	surowica	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	surowica do 7 dni w temp. 2-8°C	Immunochemiczna	1 raz w tygodniu
3278	Przeciwciała swoiste przeciwko kile (test TPHA)	Krew na skrzep	surowica	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	surowica do 7 dni w temp. 2-8°C	Immunochemiczna	1 raz w tygodniu

Pracownia Bakteriologii Ogólnej (tel. wew. 1311, 4703); osoba do kontaktu: mgr Joanna Klepacka

3207	Bakterie tlenowe - materiały ropne	Ropa, punktát, biopát, wycinek, wymaz z rany; płyny z jam ciała pobrane do próbówki; inne w razie potrzeby; biomateriał (np. fragment graftu, zastawki) lekko zwilżony jałowym 0,9% NaCl	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Max czas przechowywania do 24 godz.	do 24 godz. w temp. pokojowej	Posiew	2-7 dni
3208	Bakteriologiczne badanie moczu	Mocz w próbówce	do godziny po pobraniu	temp. 2-8°C	Nd.	do 2 godz. w temp. 2-8°C	Posiew	2-5 dni
		Mocz na uromedium	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	do 24 godz. w temp. pokojowej		
3209	Badanie płwociny, BAL, BL	Plwocina odkrztuszona/ indukowana, BAL (popłuczyny oskrzelowo -pęcherzykowe), BL (popłuczyny oskrzelowe)	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	do 2 godz. temp. pokojowa; do 24 godz. temp. 2-8°C	Posiew	2-7 dni
3214	Badanie mikroflory pochwy	Wymaz z pochwy	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. pokojowa	temp. pokojowa	Posiew	2-7 dni
3215	Bakteriologiczne badanie wymazów z gardła, krtani, nosa, aspirat tchawiczy	Wymazy z górnych dróg oddechowych, treść deplasacyjna, aspirat tchawiczy, treść z drzewa oskrzelowego	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	do 2 godz. temp. pokojowa; do 24 godz. temp. 2-8°C	Posiew	7 dni
3223-B	Posiew płynu w systemie BACTEC w kierunku bakterii tlenowych	Płyn z opłucnej/ otrzewnej/ płyn z jamy ciała	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	Nd.	Posiew	7 dni
3228	Badanie płynów jałowych (aptecznych)	Płyn infuzyjny, płyn bazowy	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	temp. 2-8°C	Posiew	14 dni
3232	Biologiczna kontrola sterylizacji – autoklaw, tlenek etylenu, suche gorące powietrze	Sporal A	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	do 24 godz. w temp. pokojowej	Posiew	2 dni
3243	Lekowrażliwość bakterii przy użyciu Etest (1 lek)	Szczep	24-godzinna hodowla	temp. pokoj.	Wyłącznie po uzgodnieniu z laboratorium	temp. 2-8°C	Posiew	24-48 godz.
3253-B, 3253-P	Badanie w kierunku szczepów o fenotypie KPC	Wymaz z dróg oddechowych, aspirat tchawiczy; wymaz z odbytu, stolec	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	wymazy temp. pokojowa; aspirat, stolec: temp. 2-8°C	Posiew	2-3 dni
3254	Badanie w kierunku szczepów o fenotypie MRSA/MRSE	Wymaz z dróg oddechowych, aspirat tchawiczy	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	wymazy temp. pokojowa; aspirat, stolec: temp. 2-8°C	Posiew	2-3 dni

3255-B, 3255-P	Badanie w kierunku szczepów o fenotypie VRE	Wymaz z dróg oddechowych, aspirat tchawiczy; wymaz z odbytu, stolec	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	wymazy temp. pokojowa; aspirat, stolec: temp. 2-8°C	Posiew	2-3 dni
3273	Badanie skринingowe materiału z dróg oddechowych	Wymaz z dróg oddechowych, aspirat tchawiczy	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	wymazy temp. pokojowa; aspirat temp. 2-8°C	Posiew	do 4 dni
3283	Bakteriologiczne badanie wymazów innych niż z dróg oddechowych	Wymaz z ucha, oka, worka spojówkowego; żółć; końcówka cewnika, dren	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	temp. pokojowa	Posiew	Do 7 dni
Pracownia Pałeczek Jelitowych (tel. wew. 1371, 4946); osoba do kontaktu: mgr Kamila Klich								
3204	Stolec w kierunku <i>Plesiomonas</i>	Stolec	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	temp. 2-8°C	Posiew	2-5 dni
3205	Stolec w kierunku <i>Aeromonas</i>	Stolec	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	temp. 2-8°C	Posiew	2-5 dni
3206	Bakteriologiczne badanie stolca	Stolec, smółka	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	temp. 2-8°C	Posiew	2-5 dni
3210	Stolec w kierunku <i>Yersinia</i>	Stolec	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	temp. 2-8°C	Posiew	2-5 dni
3211	Stolec w kierunku potencjalnie enteropatogennych szczepów <i>E.coli</i>	Stolec	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	temp. 2-8°C	Posiew	3-4 dni
3213	Stolec w kierunku <i>Salmonella</i> i <i>Shigella</i>	Stolec	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	temp. 2-8°C	Posiew	2-5 dni
3274	Badanie skринingowe materiału z przewodu pokarmowego	Stolec, wymaz z odbytu	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	wymazy temp. pokojowa; stolec temp. 2-8°C	Posiew	Do 4 dni
3276	Wykrywanie toksyn Shiga typu 1/2 w próbkach kału	Stolec	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	temp. 2-8°C	Immunochemiczna	1 godz
Pracownia Płynów Jałowych (tel. wew. 1311, 4703); osoba do kontaktu: mgr Joanna Klepacka								
3217	Posiew krwi w systemie BACTEC w kierunku bakterii tlenowych	Krew	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	Nd.	Posiew	7 dni
3218	Posiew krwi w systemie BACTEC w kierunku bakterii beztlenowych	Krew	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	Nd.	Posiew	7 dni

3219	Posiew krwi w systemie BACTEC w kierunku grzybów	Krew	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	Nd.	Posiew	14 dni
3220	Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w systemie BACTEC w kierunku bakterii tlenowych	Płyn mózgowo-rdzeniowy	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Jeśli dłuższy – zabezpieczyć w temp. 36°C (termos)	Nd.	Posiew	7 dni
3221	Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w systemie BACTEC w kierunku bakterii beztlenowych	Płyn mózgowo-rdzeniowy	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Jeśli dłuższy – zabezpieczyć w temp. 36°C (termos)	Nd.	Posiew	7 dni
3222	Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w systemie BACTEC w kierunku grzybów	Płyn mózgowo-rdzeniowy	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Jeśli dłuższy – zabezpieczyć w temp. 36°C (termos)	Nd.	Posiew	14 dni
3223-PU	Posiew innych płynów ustrojowych w systemie BACTEC w kierunku bakterii tlenowych	Płyn dializacyjny, płyn z osierdzia, materiał przeszczepowy	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	Nd.	Posiew	7 dni
3224-PU	Posiew innych płynów ustrojowych w systemie BACTEC w kierunku bakterii beztlenowych	Płyn dializacyjny, płyn z osierdzia, materiał przeszczepowy	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	Nd.	Posiew	7 dni
3225-PU	Posiew innych płynów ustrojowych w systemie BACTEC w kierunku grzybów	Płyn dializacyjny, płyn z osierdzia, materiał przeszczepowy	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	Nd.	Posiew	14 dni
Pracowania Mykologii (tel. wew. 1371, 4946); osoba do kontaktu: mgr Barbara Wąsik								
3203	Badanie mykologiczne (nie dotyczy badań 3219,3222,3225)	Każdy rodzaj materiału	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Stolec, mocz w probówce Pozostałe materiały	temp. 2-8°C temp. pokojowa	Posiew	Do 7 dni
3225-G	Posiew płynu w systemie BACTEC w kierunku grzybów	Płyn z opłucnej/otrzewnej/ płyn z jamy ciała	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	Nd.	Posiew	14 dni
3230	Badanie w kierunku dermatofitów (grzybice skóry, włosów, paznokci)	Zeskrobiny ze skóry, włosów, opłuki paznokci; szczep dostarczony przez zewnętrznego zlecaniodawcę	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	temp. pokojowa	Posiew	4-6 tygodni
3239, 3247 – cito*	Wykrywanie antygenu krążącego <i>Aspergillus</i>	Krew na skrzep, surowica, BAL	Surowica, BAL	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	do 5 dni w temp. 2-8°C	Immunochemiczna do 7 dni *do 48 godzin w dni robocze

3240, 3248 – cito*	Wykrywanie antygenu krążącego <i>Candida</i>	Krew na skrzep, surowica	Surowica	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	do 5 dni w temp. 2-8°C	Immunochemiczna	do 7 dni *do 48 godzin w dni robocze
3242	Lekowrażliwość grzybów (drożdże/pleśnie) przy użyciu Etest – (1 lek)	Szczep		Świeża hodowla	temp. pokoj.	Wyłącznie po uzgodnieniu z laboratorium	temp. pokojowa	Posiew	Do 48 godz.
3245, 3249 – cito*	Wykrywanie przeciwciał przeciw <i>Candida</i> IgG/IgA/IgM	Krew na skrzep, surowica	Surowica	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	do 4 dni w temp. 2-8°C	Immunochemiczna	do 14 dni *do 48 godzin w dni robocze
3246, 3250 – cito*	Wykrywanie przeciwciał przeciw <i>Aspergillus</i> IgG	Krew na skrzep, surowica	Surowica	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	do 4 dni w temp. 2-8°C	Immunochemiczna	do 14 dni *do 48 godzin w dni robocze
3252	Wykrywanie antygenu <i>Cryptococcus neoformans</i> w płynach fizjologicznych	Krew na skrzep, PMR, surowica, BAL, mocz	Surowica, PMR, BAL, mocz	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	Do 8 godz. w temp. 2-8°C	Immunochemiczna	do 48 godz. w dni robocze
Pracownia Zakażeń Szpitalnych (tel. wew. 4700); osoba do kontaktu: dr Iwona Żak									
3234	Ocena czystości mikrobiologicznej powierzchni	Wymazy z powierzchni, próbki odciskowe		do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z laboratorium!	temp. pokojowa	Posiew	4-6 dni
3235	Ocena czystości mikrobiologicznej powietrza	Próby powietrza		do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z laboratorium!	temp. pokojowa	Posiew	4-6 dni
Pracownia diagnostyki molekularnej (tel.wew. 1312, 4704); osoba do kontaktu: mgr Karolina Grzebinoga									
3279	Patogeny układu oddechowego (w tym SARS-CoV-2) metodą Real-Time PCR	Wymaz z nosogardzieli pobrany na podłoże UTM (Copan)		do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. pokojowa	Do 4 godz. w temp. pokojowej; powyżej 4 godz.- do 3 dni w temp. 2-8°C	Multiplex PCR	codziennie
3280	Patogeny układu pokarmowego metodą Real-Time PCR	Stolec pobrany na podłoże Fecal Swab		do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. pokojowa	do 4 dni w temp. pokojowej lub w temp. 2-8°C	Multiplex PCR	codziennie
3281	Patogeny układu nerwowego metodą Real-Time PCR	Płyn mózgowo-rdzeniowy		do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. pokojowa	do 24 godz. w temp. pokojowej; powyżej 24 godz. do 7 dni w temp. 2-8°C	Multiplex PCR	codziennie

3284, 3285 – cito*	Ilościowa ocena DNA wirusa CMV metodą PCR	Krew pełna na EDTA, osocze, surowica, PMR, mocz, płyn owodniowy, wymaz z policzka	osocze, surowica, PMR, mocz, płyn owodniowy, wymaz z policzka	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	temp. 2-8°C	PCR	2 razy w tygodniu *do 48 godz. w dni robocze
3286, 3287 – cito*	Ilościowa ocena DNA wirusa EBV metodą PCR	Krew pełna EDTA, osocze, surowica, PMR	osocze, surowica, PMR	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	temp. 2-8°C	PCR	2 razy w tygodniu *do 48 godz. w dni robocze
3288	Jakościowa ocena DNA wirusa HHV6/7/8 metodą PCR	Krew pełna EDTA, osocze, PMR; wymazy pobrane na podłoże transporto we UTM (Copan)	osocze, PMR; wymazy pobrane na podłoże transportowe UTM (Copan)	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	Temp. 2-8°C	PCR	2 razy w tygodniu
3289, 3290 – cito*	Jakościowa ocena DNA wirusa HSV1/2/VZV metodą PCR	Krew pełna EDTA, osocze, PMR, mocz; wymazy (z narządów moczowo- płciowych, ze strupków, zmian skórnych) pobrane na podłoże transporto we UTM (Copan)	osocze, PMR, mocz; wymazy (z narządów moczowo- płciowych, ze strupków, zmian skórnych) pobrane na podłoże transportowe UTM (Copan)	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	Temp. 2-8°C	PCR	2 razy w tygodniu *do 48 godz. w dni robocze

3292	Ilościowa ocena DNA adenowirusa metodą PCR	Krew pełna EDTA, osocze, PMR, materiały z dróg oddechowych	osocze, PMR, materiały z dróg oddechowych	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	temp. 2-8°C	PCR	2 razy w tygodniu
3293	Ilościowa ocena DNA BKV metodą PCR	Krew pełna EDTA, osocze, PMR, mocz	osocze, PMR, mocz	natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	temp. 2-8°C	PCR	2 razy w tygodniu
3294	Diagnostyka molekularna zakażeń wywołanych przez wirusy grypy A/B, RSV oraz SARS-CoV-2	Wymaz z nosogardzieli pobrany na podłoże UTM (Copan)		do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. pokojowa	do 48 godz. w temp. pokojowej; powyżej 48 godz. do 6 dni w temp. 2-8°C	PCR	codziennie
3296	Diagnostyka molekularna zakażeń dolnych dróg oddechowych metodą multiplex PCR	BAL, BL, aspirat tchawiczy		natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	Nd.	maksymalnie do 24 godz. w temp. 2-8°C	Multiplex PCR	codziennie
3297CD	Diagnostyka molekularna zakażeń wywołanych przez <i>Clostridioides difficile</i>	Stolec biegunkowy (nieuformowany)		do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. 2-8°C	do 24 godz. w temp. pokojowej; powyżej 24 godz. do 5 dni w temp. 2-8°C	PCR	codziennie
3297 CARBA	Wykrywanie i różnicowanie karbapenemaz KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48	Wymaz z odbytu, stolec		do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	Do czasu transportu temp. pokojowa	do 5 dni w temp. pokojowej	PCR	codziennie
3298	Diagnostyka molekularna zakażeń krwi metodą multiplex PCR	Dodatni posiew krwi		do godziny po wyjęciu z analizatora	temp. pokoj.	wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z laboratorium!	Nd.	Multiplex PCR	codziennie
Pracownia Wirusologii i Serologii (tel. wew. 1328, 4944); osoba do kontaktu: mgr Dorota Kurowska-Baran									
3307, 3348 – cito*	Przeciwciała przeciw HIV i Ag p24 HIV (jakościowo)	Krew na skrzep	surowica	do godziny po pobraniu; *natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. lodówki	temp. 2-8°C	Immunochemiczna	Do 7 dni *do 24 godz. w dni robocze
3305	Przeciwciała przeciw HAV klasy IgM (jakościowo)	Krew na skrzep,	surowica	do godziny po pobraniu	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. lodówki	temp. 2-8°C	Immunochemiczna	Do 7 dni

3323, 3350 – cito*	HBs - antygen HBs (jakościowo)								
3332	- test potwierdzenia obecności Ag HBs (jakościowo)	Krew na skrzep	surowica	do godziny po pobranii; *natychmiast po pobranii	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. lodówki	temp. 2-8°C	Immunochemiczna	Do 7 dni *do 24 godz. w dni robocze
3319, 3351 – cito*	- poziom przeciwciał przeciw HBs (ilościowo)								
3321, 3382 – cito*	HBe - antygen HBe (jakościowo)	Krew na skrzep	surowica	do godziny po pobranii; *natychmiast po pobranii	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. lodówki	temp. 2-8°C	Immunochemiczna	Do 7 dni *do 24 godz. w dni robocze
3318, 3383 – cito*	- przeciwciała przeciw HBe (jakościowo)								
3317, 3352 – cito*	HBc - przeciwciała przeciw HBc (jakościowo)	Krew na skrzep	surowica	do godziny po pobranii; *natychmiast po pobranii	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. lodówki	temp. 2-8°C	Immunochemiczna	Do 7 dni *do 24 godz. w dni robocze
3306, 3384 – cito*	- przeciwciała przeciw HBc klasy IgM (jakościowo)								
3320, 3349 – cito*	Przeciwciała przeciw HCV (jakościowo)	Krew na skrzep	surowica	do godziny po pobranii; *natychmiast po pobranii	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. lodówki	temp. 2-8°C	Immunochemiczna	Do 7 dni *do 24 godz. w dni robocze
3302, 3354 – cito*	CMV - przeciwciała przeciw CMV klasy IgM (jakościowo)	Krew na skrzep	surowica	do godziny po pobranii; *natychmiast po pobranii	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. lodówki	temp. 2-8°C	Immunochemiczna	Do 7 dni *do 24 godz. w dni robocze
3312, 3353 – cito*	- przeciwciała przeciw CMV klasy IgG (półilościowo)								
3333	- awidność przeciwciał przeciw CMV klasy IgG								

3377 - cito*	Borrelia klasy IgG w surowicy – test przesiewowy (ilościowo)	Płyn mózgowo-rdzeniowy	Płyn mózgowo-rdzeniowy						
3336, 3378 - cito*	- przeciwciała przeciw Borrelia klasy IgM w PMR – test przesiewowy (ilościowo)								
3341, 3379 - cito*	- przeciwciała przeciw Borrelia klasy IgG w PMR – test przesiewowy (ilościowo)								
3337	- przeciwciała przeciw Borrelia klasy IgM w surowicy - Western Blot (test potwierdzenia; jakościowo)								
3338	- przeciwciała przeciw Borrelia klasy IgG w surowicy - Western Blot (test potwierdzenia; jakościowo)	Krew na skrzep	Surowica						
3339	- przeciwciała przeciw Borrelia klasy IgM W PMR - Western Blot (test potwierdzenia; jakościowo)								
3340	- przeciwciała przeciw Borrelia klasy IgG W PMR - Western Blot (test potwierdzenia; jakościowo)								
3342, 3380 - cito*	MYCOPLASMA PNEUMONIAE - przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae klasy	Krew na skrzep	surowica	do godziny po pobraniu; *natychmiast po pobraniu	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. lodówki	temp. 2-8°C	Immunochemiczna	Do 7 dni *do 24 godz. w dni robocze

3343, 3381 – cito*	IgM (jakościowo) - przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae klasy IgG (półilościowo)								
3365, 3367 – cito* 3366, 3368 – cito*	PARWOWIRUS B19 - przeciwciała przeciw Parwovirus B19 klasy IgM (jakościowo) - przeciwciała przeciw Parwovirus B19 klasy IgG (ilościowo)	Krew na skrzep	surowica	do godziny po pobranu; *natychmiast po pobranu	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. lodówki	temp. 2-8°C	Immunochemiczna	Do 7 dni *do 24 godz. w dni robocze
3326	ASO (półilościowo)	Krew na skrzep	surowica	do godziny po pobranu;	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. lodówki	temp. 2-8°C	Immunochemiczna	Do 7 dni
3345	Antygen rotawirusa, adenowirusa i norowirusa (jakościowo)	Stolec		do godziny po pobranu;	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. lodówki	temp. 2-8°C	Immunochemiczna	Do 24 godz. w dni robocze
3375	Antygeny wirusów pneumotropowych II (wirusy grypy A/B, RSV, SARS-CoV-2; jakościowo)	Wymaz z nosogardzi eli		natychmiast po pobranu	temp. pokoj.	do czasu transportu temp. lodówki	temp. 2-8°C	Immunochemiczna	Do 30 minut

UWAGA: temp. pokoj. – temperatura pokojowa (15-25°C). Tryb *cito** - materiał dostarczyć natychmiast po pobranu; czas oczekiwania na wynik – patrz ostatnia kolumna.